

SEQUENZA DI UTILIZZO DEI DPI

PRIMA DI ENTRARE NEL LOCALE O DI VISITARE IL PAZIENTE

Fase 1: indossare il camice monouso.



Fase 2a: indossare la mascherina chirurgica sopra il naso, la bocca e il mento, assicurarla con gli elastici/lacci sopra la testa.



Fase 2b: se sussiste la necessità allora **INDOSSARE** il FFP-2 sopra il naso, la bocca e il mento, stringere la parte flessibile sopra il naso, assicurarla con gli elastici/lacci sopra la testa.



Fase 3: eseguire la prova di tenuta FFP-2: inspirando la maschera deve collassare, espirando si controllano eventuali perdite dai bordi.



Fase 4: indossare, se necessario gli occhiai protettivi ed assicurarsi che siano aderenti al viso.




Fase 5: indossare i guanti monouso.



DOPO LA VISITA DEL PAZIENTE / PRELIEVO DEL CAMPIONE

Fase 1: sfilare i guanti rivoltandoli e riporli nell'apposito sacchetto richiudibile o contenitore per materiali a rischio biologico.

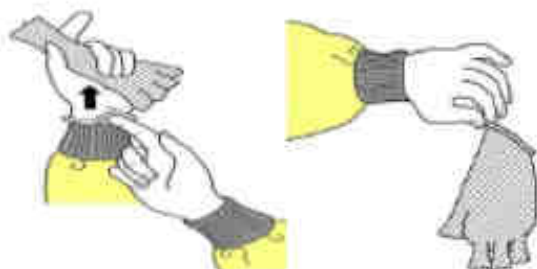

Fase 2: togliere il camice monouso e riporlo nell'apposito sacchetto richiudibile o contenitore per materiali a rischio biologico



Fase 3: igiene delle mani:

- o con acqua e sapone
- o con salviette disinfettanti
- o con gel disinfettante a base alcolica



Fase 4: togliere gli occhiali protettivi.

NON GETTARE ma riporli nel sacchetto dedicato epr la successiva decontaminazione



Fase 5:

togliere la maschera e riporla nell'apposito sacchetto richiudibile o contenitore per materiali a rischio biologico.



Fase 6: igiene delle mani:

- o con acqua e sapone
- o con salviette disinfettanti
- o con gel disinfettante a base alcolica

